

3.2.5 Programm: CALIBRATE

Die Serviceoptionen „CALIBRATE“ und „SAFE TEST“ bilden eine Sonderstellung. Wird eine der beiden durchgeführt, schlägt der Injectomat® PCA-PACOM automatisch die andere zur anschließenden Ausführung vor.



Hinweis:

Nach Durchführung beider Optionen in unmittelbarer Aufeinanderfolge werden die STK-Stunden automatisch auf Null gesetzt.

Mit Hilfe der Serviceoption „CALIBRATE“ kann der Injectomat® PCA-PACOM neu kalibriert werden.

CALIBRATE ?

- Programm mit der **Start-Taste** aufrufen.

*** ZERO_T.P. ?**

- Die Nullage der FSR-Taste wird überprüft.

+ Taste 5 ?

- **Start-Taste**
- hier kann die Empfindlichkeit der **+Taste** verändert werden.
Grundeinstellung: 5, Einstellbereich: 0 – 10
Mit den **+/- -Tasten** Wert einstellen.
Je kleiner der Wert, desto höher die Empfindlichkeit.

- Taste 5 ?

- **Start-Taste**
- hier kann die Empfindlichkeit der **-Taste** verändert werden.
Grundeinstellung: 5, Einstellbereich: 0 – 10
Mit den **+/- -Tasten** Wert einstellen.
Je kleiner der Wert, desto höher die Empfindlichkeit.



Hinweis:

Wollen Sie nur die Empfindlichkeit der FSR verändern, können sie mit der **Ein/Aus-Taste** das Serviceprogramm vorzeitig beenden.
Die eingestellten Daten werden gespeichert und das Gerät schaltet sich ab.

*** END_L.P. ?**

- Spritze einlegen und auf Endposition stellen. Dann den Knebel in die Platte des Spritzenkolbens einhängen.

*** STRT_L.P. ?**

- **Start-Taste**
- Startposition der Spritze einstellen und Knebel einhängen.
Der Spritzenkolben wird dabei auf folgende Werte eingestellt:
 - 45,0 ml = 67,5 mm bei IS-50 (50-ml Fresenius-Spritze)
 - 10,0 ml = 50,0 mm bei IS-10 (10-ml Fresenius-Spritze)
 - 38,0 ml = 62,5 mm bei PS-50 (50-ml Perfusor-Spritze)
- **Start-Taste**

Danach wird die Serviceoption „SAFE TEST“ vorgeschlagen.