

АМАДЕУС 1071 NT.

ПРОБЛЕМА:

Движение спинки кресла происходит рывками и издается прерывистый звуковой сигнал.

ПРИЧИНА:

Происходит смещение датчика Холла, расположенного на двигателе подъема и опускания кресла, за счет термального расширения герметика, которым зафиксирован датчик.

РЕШЕНИЕ:


1. Поднимите кресло в крайнее верхнее положение.



2. Снимите боковую крышку кресла (4 болта).



3. Отсоедините спинку кресла.

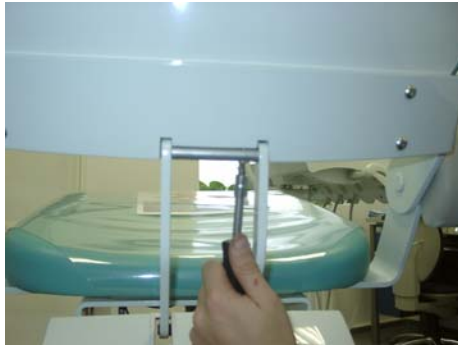

4. Открутите стопорную гайку датчика.



5. Позиционируйте поэтапно датчик Холла до тех пор, пока не исчезнет ошибка, поворачивая его по или против часовой стрелки с последующей проверкой движения спинки кресла.

6. Откалибруйте движение кресла, для чего необходимо нажать кнопку LP/A1 на ножном блоке управления креслом, и удерживать до третьего звукового сигнала.